



BRUKSANVISNING

Syftet med det här häftet är att informera användare av Bausch + Lomb daily disposable hydrofila mjuka kontaktlinser om hur man bär och sköter sina linser.

Det gäller:

| PRODUKTNAMN | MATERIAL | VATTENIN-NEHÄLL | FÖRPACKNINGS-LÖSNING |
|---|--------------|-----------------|---|
| SofLens® daily disposable (hilafilcon B) Hanteringsfärgade kontaktlinser för daglig användning | Hilafilcon B | 59 % av vikten | Boratbuffrad koksaltlösning med poloxamin |
| SofLens® daily disposable Toric (hilafilcon B) Hanteringsfärgade kontaktlinser för daglig användning | | | |
| Naturelle™ daily disposable (hilafilcon B) Kosmetisk färgade kontaktlinser för daglig användning | | | |
| Biotrue® ONEday (nesofilcon A) Hanteringsfärgade kontaktlinser för daglig användning | Nesofilcon A | 78 % av vikten | |
| Biotrue® ONEday for Presbyopia Poloxamin (Nesofilcon A) leicht getönte Kontaktlinse | | | |
| Biotrue® ONEday For Astigmatism (nesofilcon A) hanteringsfärgade kontaktlinser | | | |

Indikation

Bausch + Lomb (hilafilcon B och nesofilcon A) kontaktlinser är avsedda för daglig användning för korrigerande av refraktiv ametropi (myopi, hyperopi, astigmatism), presbyopi och minskad sfärisk aberration hos afaka och/eller icke-afaka personer med friska ögon som uppvisar refraktiv astigmatism på upp till 2,00 dioptrier eller mindre (SofLens® daily disposable Toric och Biotrue® ONEday For Astigmatism upp till 5.00 dioptrier) som inte stör synskärpan. Linsen ordineras för engångsbruk i sfärisk styrka mellan +20,00 D och -20,00 D och ska kasseras efter varje användning.

Beskrivning och bruk

Linserna är avsedda för dagligt engångsbruk och ska kasseras efter varje användningsperiod. Återanvändning utan att linserna rengörs och desinficeras kan leda till infektion och/eller allvarlig ögonskada. Följ alltid optikers rekommenderade schema för användning.




Linserna levereras sterila och är enligt tillverkaren avsedda att användas under en period på högst en dag. De har ångsteriliserats.

ANVÄND INTE produkten om förpackningen är skadad eller öppnad.

Anvisningar för insättning och borttagning

Innan du hanterar linserna, tvätta och torka alltid händerna ordentligt och undvik tvål med läkemedel eller parfym. Håll ut linsen i handflatan. Se till att linsen är vänd åt rätt håll.

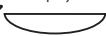

Kontrollera linsen innan du sätter in den och använd den inte om den är repad eller skadad.

Ta bort linsen med rena och torra händer genom att med ett finger dra ned linsen till ögonvitan och sedan avlägsna den. Använd återfuktningssdroppar om linsen är svår att avlägsna. Bortskaffa alltid linsen efter att den har avlägsnats från ögat.

Underhåll av dina linser

- Tvätta och skölj alltid händerna innan du hanterar linserna.
- Låt ingen kosmetika, lotion, tvål, kräm eller parfymrat ämne komma in i ögat eller på linserna.
- Använd aldrig vassa föremål eller naglar till att avlägsna linserna från sina behållare eller dina ögon.
- Bortskaffa alltid linserna efter att de har avlägsnats.

Varningar och försiktighetsåtgärder

Om du inte följer din optikers rekommenderade schema för användning och rengöring kan det leda till en större risk för allvarliga ögoninfektioner.

Använd inte engångslinserna för dagligt bruk under mer än en dag och inte när du sover.

Använd inte kontaktlinser om du har:

- Allergi, inflammation, infektion eller rodnad i eller runt ögat
- Torra ögon (otillräcklig mängd tårvätska)
- Nedsatt hälsa som påverkar ögonen, t.ex. förkylning eller influensa
- En systemisk sjukdom som påverkar ögonen

Kontakta din optiker innan du använder kontaktlinser i följande fall:

- Om du deltar i vattensporter
- I extremt torra eller dammiga miljöer
- Om du använder ögonmedicin

Avlägsna dina linser omedelbart om något av följande problem uppstår:

- Det sticker, bränner, kliar eller gör ont i ögonen eller ögonen känns irriterade
- Nedsatt komfort jämfört med tidigare användning
- Ovanlig utsöndring eller rikligt tårflöde
- Röda ögon
- Allvarligt eller ihållande torra ögon
- Nedsatt eller dimmig syn
- Regnbågar eller ljusgloria runt ljus
- Ljuskänslighet

Om något av dessa symptom fortsätter efter att en lins tagits ut och en ny lins har satts in, avlägsna linsen och kontakta din optiker. Dessa symptom kan leda till mer allvarliga tillstånd om de ignoreras.

Ytterligare varningar och försiktighetsåtgärder för Biotrue ONEday (nesofilcon A) kontaktlins

Varning: UV-absorberande kontaktlinser ersätter inte skyddande UV-absorberande glasögon, såsom UV-absorberande skyddsglasögon eller solglasögon, eftersom de inte helt täcker ögat och det omgivande området. Du bör fortsätta att använda UV-absorberande glasögon enligt anvisningarna.

Obs! Långvarig exponering för UV-strålning är en av de riskfaktorer som förknippas med grå starr. Exponeringen bygger på ett antal faktorer såsom miljöförhållanden (höjd, geografi, molnighet) och personliga faktorer (omfattning och typ av utomhusaktiviteter). UV-blockerande kontaktlinser bidrar till att ge skydd mot skadlig UV-strålning.

Obs! Hur effektivt det är att bära UV-absorberande kontaktlinser för att förebygga eller minska förekomsten av okulära problem som är kopplade till exponering för UV-ljus har ännu inte fastställts. Kliniska studier för att bevisa att användningen av UV-blockerande kontaktlinser minskar risken för grå starr eller andra ögonproblem har dock inte utförts. Be din optiker om mer information.

Följande symboler finns på etiketter och förpackningar



Avgift betald för avfallshantering enligt 94/62/EG



Bausch & Lomb Incorporated
1400 North Goodman Street
Rochester NY, 14609, USA



Bausch & Lomb Incorporated
106 London Road
Kingston-upon-Thames KT2 6TN, UK

Datum för utfärdande: 2017-07-26



0050 Anger CE-märkningen och det anmälda organets nummer



Får ej återanvändas



Lägsta temperatur vid förvaring



Se produktinformation



Symbol för steril och värmesterilisering



Endast för USA: OBS! Till följd av federal lagstiftning får denna produkt endast säljas av, eller på order av, legitimerad läkare.

®/™ är varumärken som tillhör Bausch & Lomb Incorporated eller dess dotterbolag.

© Bausch & Lomb Incorporated