

Oxyal®

Oxyal®

SE

Smörjande ögondroppar med hyaluronsyra

Sammansättning: 0,15% natriumhyaluronat, borsyra, 0,5 % polyetylenglykol 8000 (PEG 8000), natriumklorid, kaliumklorid, kalciumkloriddihydrat, magnesiumkloridhexahydrat, Oxyd®* 0,06%, renat vatten


Beskrivning: Oxyal® är en smörjande lösning för ögonen som innehåller 0,15 % hyaluronsyra. Hyaluronsyran som finns i produkten har erhållits via fermentering och har inte animaliskt ursprung.

Elektrolyterna (klorider, natrium, kalium, kalcium och magnesium), som är viktiga för de cellulära biokemiska processerna, och att lösningen är lätt hypoton hjälper till att bibehålla fysiologiska förhållanden på ögonytan. Oxyal® innehåller Oxyd®, ett patenterat konserveringssystem som förvandlas till syre, vatten och natriumklorid vid kontakt med ögat. Dessa substanser, som finns naturligt i tårvätskan, irriterar inte ögonen och håller epitelcellerna friska.

Indikationer: Oxyal® ger omedelbar och varaktig lättnad vid torra, irriterade och trötta ögon vars orsak inte är patologisk utan beror på externa faktorer som långvarig exponering för bildskärmar, luftkonditionering, damm, miljöföroreningar, rök osv.

Oxyal® är indikerat även för personer som använder kontaktlinser.


Bruksanvisning:

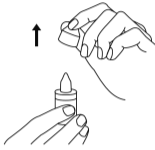

1. Tvätta händerna innan du använder produkten. Ta bort skyddslocket från flaskans spets innan varje användning. Undvik att ögat eller fingrar kommer i kontakt med flaskans spets för att förebygga eventuell kontaminering av lösningen.



2. Luta huvudet något bakåt, dra försiktigt ned ditt nedre ögonlock med ett finger och håll flaskan vertikalt med spetsen pekandes nedåt ovanför ditt öga med den andra handen. Kläm nu försiktigt ut en droppe ur flaskan.

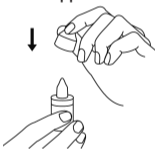

3. Sätt tillbaka locket på flaskan efter varje användning.

Varningar:

- Utsätt inte produkten för solljus.
- När flaskan öppnats ska lösningen användas inom 60 dagar.
- Kassera eventuell resterande lösning.
- Låt inte flaskans spets komma i kontakt med någonting för att förhindra eventuell kontaminering.
- Använd inte produkten vid överkänslighet mot något av innehållsämnen.
- Sällsynta tillfällen av mild okulär irritation har rapporterats med produkten. Sluta med användning om du upplever smärta, rödögdhet eller förändrad syn efter droppning. Rådgor med läkare om symtomen kvarstår eller förvärras.
- Svälj inte lösningen.
- Förvaras utom räckhåll för barn.
- Använd inte lösningen efter utgångsdatum.
- Förvara flaskan vid högst 25 °C.
- Kontakta läkare vid bestående problem.
- Droppa inte Oxyal® i ögonen tillsammans med andra preparat, effekten kan förändras.
- Får inte frysas.

Information lämnas av:

Bausch & Lomb Nordic AB
Söder Mälarstrand 45
SE-10465 Stockholm
SWEDEN

* Oxyd® patenterat

STERILE A

+25°C
+5°C



CE
0483



Dr. Gerhard Mann
Chem.-pharm. Fabrik GmbH
Brunsbütteler Damm 165-173
D-13581 Berlin

**Jälleemyyjä / distribueras av /
distribuert av / distribueret af:**
Bausch & Lomb Nordic AB
Söder Mälarstrand 45
SE-10465 Stockholm
SWEDEN

®/™ are trademarks of Bausch & Lomb Incorporated or its affiliates.

© Bausch & Lomb Incorporated.